



Efektivita

- Unikátní konstrukční řešení nástroje přináší rychlé a bezpečné opracování kanálku recipročním pohybem
- Snadná obturace gutaperčovými čepky s 6% konicitou

Flexibilita

- Vyrobeno z vysoce flexibilního Nitinolu s prodlouženou životností díky speciální technologii zpracování
- Proměnný trojúhelníkový profil nástroje zaručuje optimální kombinaci flexibility a trvanlivosti

Originalita

- Přítlačná síla a řízení nástroje v rukou stomatologa
- Zlacené kolénko pro lepší ochranu stomatologického násadce

Sterilizovatelnost

144 50 1305 **Unicone; 6/020 L21**
 144 50 1275 **Unicone; 6/020 L25**
 144 50 1875 **Unicone; 6/020 L31**

144 50 1315 **Unicone; 6/025 L21**
 144 50 1285 **Unicone; 6/025 L25**
 144 50 1885 **Unicone; 6/025 L31**

144 50 1325 **Unicone; 6/040 L21**
 144 50 1295 **Unicone; 6/040 L25**
 144 50 1895 **Unicone; 6/040 L31**



Set Unicone I Unicone Set of 3

L = 21	144 45 1125
L = 25	144 45 1025
L = 31	144 45 1155



Set Unicone II Unicone Set of 6

L = 21	144 45 1135
L = 25	144 45 1035
L = 31	144 45 1165



Set Unicone III MEDIN Endo Set

L = 21	144 45 1145
L = 25	144 45 1045
L = 31	144 45 1175



Start Kit Unicone

144 45 1055



144 45 1025	Set Unicone I, L25	1x
144 91 1037	Set čepy gutta percha 6/015-040	1x
144 91 1072	Set čepy absorbní papírové 6/015-040	1x
	Produktová brožura Unicone	1x
	Návod k použití	1x

Set čepy absorbní papírové 6/015-040



144 91 1072

Set čepy gutta percha 6/015-040



144 91 1037

Návod k použití

1. Primární zprůchodnění kořenového kanálku pomocí W-File 010.
2. Naměření pracovní délky – Apexlokátor, RTG.
3. Pokud je třeba – rozšíření pomocí ručních nástrojů K-File 015–020.
4. Preparace nástrojem Unicone 6/025 bez nebo pouze s 2–3 pilovými pohyby. Endomotor může být nastaven na jakýkoli z dostupných programů s recipročním pohybem.
5. Po preparaci cca 1,5–2 mm očistit nástroj a vypláchnout kanálek desinfekčním roztokem. U anatomicky složitějších kanálků zkontrolovat průchodnost kanálku nástrojem W-File.
6. Opakováním bodů 4 a 5 dosáhneme pracovní délky.

Široké kanálky můžeme rozšířit nástrojem Unicone 6/040. Pokud nástroj přestane pronikat, je nutné ihned vyčistit nástroj a kanálek, popřípadě nejdříve rozšířit kanálek nástrojem Unicone 6/020. Při primární zprůchodňování můžeme u složitějších kanálků s úspěchem použít nástroje WIZARD Navigator W1 a WIZARD Navigator W2. Pro slabé kanálky můžeme obdobným způsobem použít nástroj Unicone 6/020 a plnit gutaperčovým čepem ISO 6/020. U širokých kanálků (řezáky, špičáky) lze vynechat body 1 a 3. Po použití nástroje odkládejte do čistícího boxu a kořenový kanálek důkladně propláchněte roztokem.

Váš distributor:

MEDIN, a.s. | Vlachovická 619 | 592 31 Nové Město na Moravě
Česká republika | T: +420 566 684 327 | F: +420 566 684 384
prodej@medin.cz | www.medin.cz

Efektivita Flexibilita Originalita Sterilizovatelnost